


ForgetMeNot - ref.: FMNY2B (żółta) lub FMNB2B (granatowa)

Prosta odpowiedź na prawdziwy problem*: opaska uciskowa na palce ForgetMeNot

Dostępna w kolorze żółtym lub granatowym. Wielorazowa.

Sprzedawana w niesterylnych opakowaniach po 10 sztuk.

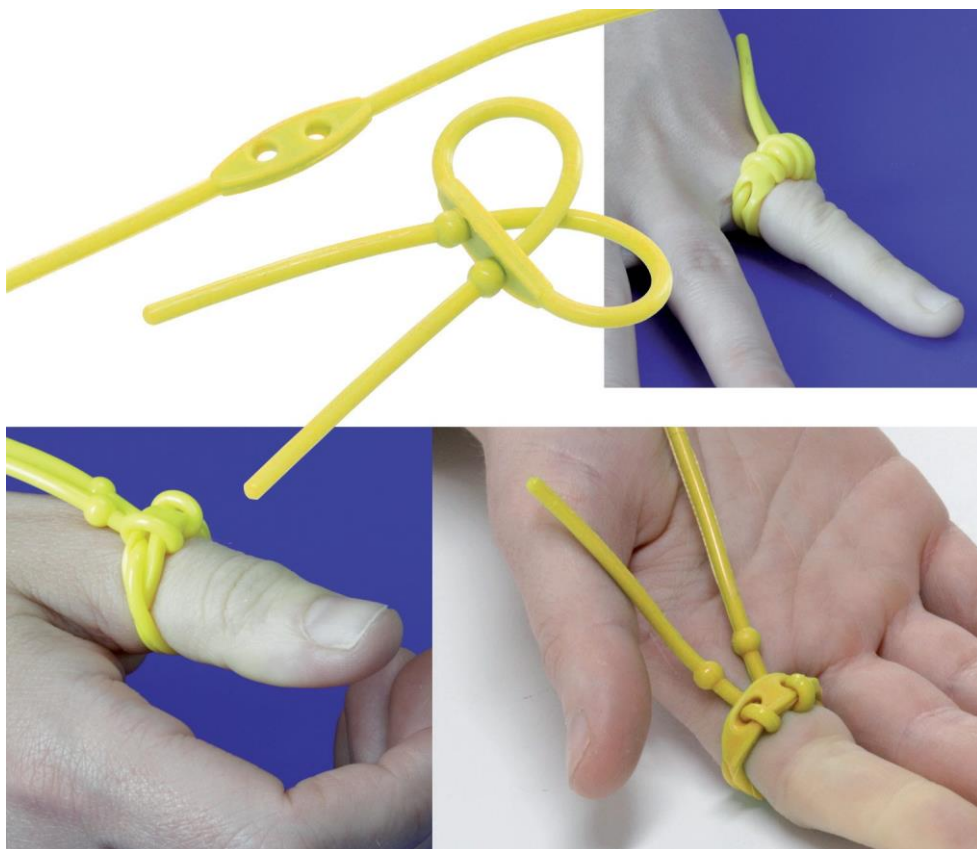

* Wyniki długoterminowego funkcjonalnego niedokrwienia palca w opasce uciskowej: na podstawie 2 obserwacji SOFCOT 2010 / Florence Mallard (Angers) Julien Richou, Dominique Le Nen

Dystrybucja w Polsce

Good For You Medical
ul. Zielna 30
62-080 Lusowo
Tel. 532 537 340
medical@good-for-you.pl

CE
Manufacturer:
AREX®
3 allée du Clos Tonnerre
91120 Palaiseau - FRANCE

www.good-for-you.pl

AREX® _ BP F91125 PALAISEAU, FRANCE — T. +33 [0] 169 412 212 _ F. +33 [0] 169 411 110 _ info@arex.fr

ForgetMeNot

Jedyna, specjalnie zaprojektowana, opaska uciskowa na palce.

Do wielokrotnego użytku.

Jeden rozmiar na wszystkie palce.


Uzyskuje całkowite zatrzymanie krążenia w palcu.

Granatowe lub żółte, dobrze widoczne końcówki sprawiają, że nie zapomnisz o nich.

Zdejmowane bez zwijania poprzez ranę i bez ryzyka skaleczenia skóry.

Przyjazne dla środowiska, ponieważ są wielokrotnego użytku.

Aby uzyskać optymalne wykorzystanie FMN, postępuj zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami poniżej. Umieszczenie opaski uciskowej FMN jest proste, łatwe i powtarzalne. Stosuje się ją w znieczuleniu miejscowym (LA) lub regionalnym (LRA).

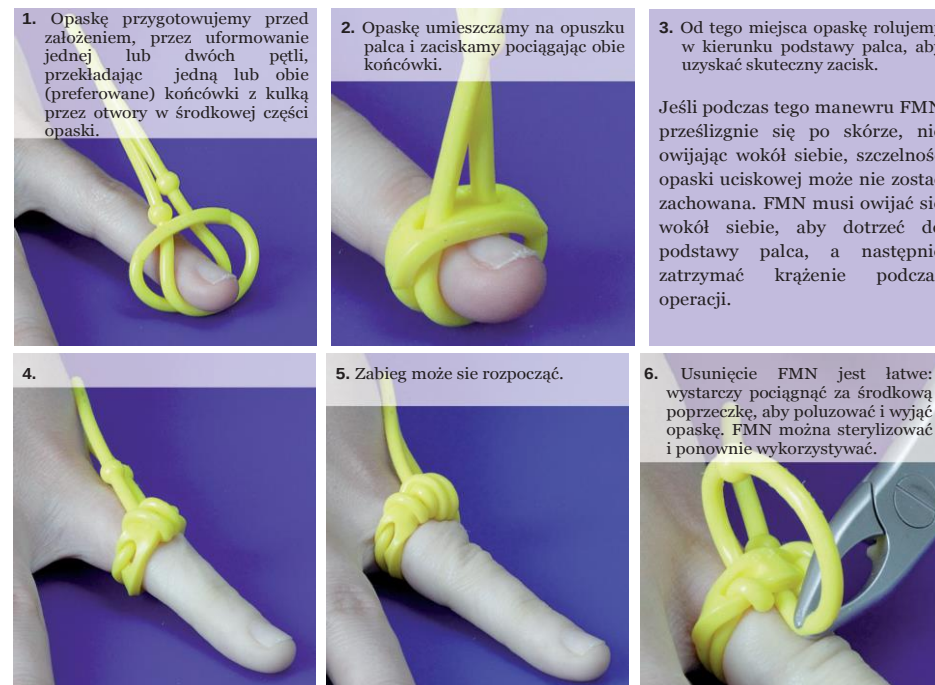

Gdy nie jest wymagane całkowite bezkrwawe pole, FMN można wykorzystać w pojedynczej pętli: ramię trzyma się przez kilka minut powyżej poziomu serca, a FMN nakłada się bezpośrednio na podstawę palca.

Przeciwwskazania

1 – nie używaj ForgetMeNot do małych palców.

2 – nie używaj ForgetMeNot u dzieci.

Powyższe przeciwwskazania związane są z fizycznymi wymiarami opasek.
3 – Nie używaj metalowych narzędzi do zaciskania opasek. Mogą one wywołać niewielkie uszkodzenia silikonu, co może spowodować pęknięcie FMN